

Wet-Stop³®

Bærbar Alarm Instruktioner

Wet-Stop3 Apparaturet er et opførsels modificeret system for behandling af sengevædning. Dette apparatur kan bruges til påvisning af vådhed resulteret af vandladning. Apparaturet består af en alarm enhed fastsat til en sensor via en kabel forbindelse. Alarmens enhed er designet med et magnetisk tether fastsættelses system til at bære med/på en pyjamas eller en skjorte top. Alarmen har 5 afvekslende forskellige toner for at undgå brugeren i at blive vant til lyden. Sensoren er designet med en klemme, som tillader nem fastsættelse til pyjamas bukser eller underbukser.

Hvordan Bruges Din Wet-Stop3 Alarm

Før-Brug Test: Luk batteri rummet op og indsæt 2 AAA batterier (ikke inkluderet). Hvis batterierne indeholder kræfter og hvis de er indsat korrekt vil den hvide knap på siden af alarmen resultere i et blinkende lys. Fastsæt sensor kablet ved sikkert at indsætte enden af kablet i alarmen. Luk sensor klemmen op og indsæt en våd klud helt inden i sensor klemmen og luk. Alarmen virker hvis der kommer lyde eller vibrationer.

For at stoppe alarmen tryk på den hvide knap i 3-4 sekunder OG afbryd sensor kablet eller tør sensoren af. Med andre ord, dette er en to trin proces og alarmen vil ikke stoppe lyd eller vibration uden at der holdes på off knappen i 3-4 sekunder og ved enten at afbryde sensor ledningen eller ved helt at tørre den helt af. Når sensoren aftørres, løft klemmen og tør helt af fra top til bund af sensoren med en tør klud, håndklæde eller toilet papir. **Det kan hænde at fugt fra dine fingre vil udløse alarmen. Hvis dette sker, skal du bare resætte alarmen.**

Wet-Stop3 Brug: Luk batteri rummet op og flyt alarm/vibration knappen til V= kun vibration, A= kun alarm; eller VA= vibration og alarm. Udskift batterierne og luk batteri rummet. Fastsæt alarm enheden til pyjamasen ved brug af den magnetiske tether spænde/strop. En frivillig fastsættelses metode er at fastsætte alarm enheden til pyjamas toppen ved brug af en sikkerhedsnål igennem hullet i toppen af tether spændet/troppen. Derefter, put sensor ledningen under pyjamasen eller natskjorten, gå ind ved flippen og ud igennem natskjortens ærme. Fastsæt sensoren til undertøjet ved at åbne og derefter lukke klemmen. Giv sensoren et forsigtigt ryk for at sikre at den er fastsat til undertøjet. Et lille smule fugt på undertøjet som er i kontakt med sensoren vil fremkalde alarmen til lyd eller vibration, så vær sikker at sætte sensoren tæt på området hvor urinen kommer ud af kroppen. Når alarm eller vibration sker, bør barnet slukke Wet-Stop3 ved at trykke på den hvide off knap i 3-4 sekunder, OG enten afbryde sensoren fra alarmen eller tørre sensoren af med en tør klud, håndklæde eller toilet papir. Husk dette er en to trin proces og alarmen vil ikke stoppe lyd eller vibration uden at der holdes på off knappen i 3-4 sekunder eller ved at afbryde sensor ledningen eller ved helt at tørre sensoren af fra top til bund. Hensigten er at gøre det mere vanskeligt for barnet at slukke for alarmen uden helt at vågne helt op. Alarmen vil ikke stoppe før denne 2 trin proces er gennemført. Advarsel: Hold ikke en alarm enhed indenfor 5 centimeter fra øret.

Forældre Hjælp er Nødvendig Ved Brug Af Alarmen:

Gennem tiden af brug af alarmen, vil forældre hjælp være nødvendig for at lære barnet i at reagere og vågne til alarmen eller vibration. Gennem denne tid er det almindeligt for dit barn at tømme blæren i sengen og opdage på vej til toiletet at der ikke er mere at tisse ud. Gennem de første uger bør dit barn stoppe vandladning tidligere og afslutte vandladningen på toiletet. Hver succes vil resultere i mindre våde pletter, som vil inskrænke yderligere ved fortsat træning. Snart derefter, bør dit barn begynde at vågne når det føles trængt, imødegå alarmen. Der vil stadig være tider hvor alarmen vil lyde, men den våde plet vil kun være på undertøjet, efterlader sengen tør. Efter omkring en til tre måneder, bør dit barn have perioder af uafbrudt tørhed. Der kan stadig være tilfældige våde nætter, så fortsæt brug af alarmen indtil dit barn har haft en månedes uafbrudt tørhed, før stop bruget af alarmen.

Et tilbagefald er når dit barn vådlægger i to eller flere nætter i træk efter en månedes eller mere i tørhed. Hvis et tilbagefald sker, begynd at brug alarmen igen med det samme. Tilbagefald er normalt lettere at kurere end den originale vådelægning. Siden dit barn måske er blevet uvant med alarmen, vil der i starten være brug for forældre hjælp, som hvis alarmen først var introduceret. Resultater vil variere fra barn til barn.

Trænings Tips:

- 1- Dit barn skal påmindes hver nat om at stoppe vandladningen så snart der er viden om alarmens lyd eller vibrationer—selv i drømme.
- 2- Gennem de første uger, hjælp dit barn med at afslutte vandladningen i badeværelset når alarmen lyder. Tænd rummets lys vil hjælp dit barn med at vågne op. Påføring af rigtigt koldt vand eller en kold vaskeklud på dit barns ansigt vil normalt vække selv det mest dybt sovende barn. Dit barn bør være den der stopper alarmen for at træningen vil være mest effektiv. Om morgenen spørg dit barn om at huske, hvad han/hun gjorde da alarmen gik af.
- 3- Tag ikke dit barn til rutine natte besøg, udover før sengetid eller som anbefalet af din læge. Dette vil være til hinder for alarmens lyd, forhindre træning i at ske og forhindre dit barn i selvstændigt at lære at vågne til alarmen.
- 4- Hvis undertøjet er vådt, bør dit barn skiftes til tørt og påsæt den rene og tørre sensor til det tørre undertøj for retuning til seng. Hvis sengen er våd, skift sengetøj eller dæk den våde plet med et underlag eller et håndklæde for at undgå fugtighed på det nye undertøj.
- 5- En ekstra time af søvn hver nat (tidligere sengetid) eller en regulær eftermiddags lur kan hjælpe dit barn i at forhindre overdreven træthed og til at reagere hurtigere til alarmen. Overdreven træthed vil fordybe dit barns søvn og gøre at dit barn reagere langsommere til alarmen.
- 6- Brug af nat-lys kan også hjælpe et dybt sovende barn til at reagere på alarmen. Hvis der er speciel vanskelighed ved at vågne til alarmen, tænd en lille bord lampe i rummet efter barnet er faldet i søvn.
- 7- Ros dit barn når som helst du observerer fremskridt; for eksempel, vågne op til alarmen eller mindre uheld. Overflod af ros når som helst han eller hun imødeser alarmen og vågner op før lyden. Du og dit barn bør registrere tørre og våde nætter i en kalender. Brug belønnings kurven med mærker som er inkluderet med Wet-Stop3 alarmen. Sølv stjerne er tjent når dit barn reagerer ved alarmen og der er en lille våd plet, og guld stjernen er tjent når dit barn er tør hele natten.
- 8- Det er anbefalet at aften intag af mad og drikke bør ungås. Børn med nattemper sengevædning bør undgå kaffe og chokolade indtag gennem hele dagen
- 9- Husk – god dagtime blære og tarm vaner leder til natteleg tørhed!!

Vedligeholdelse og Rengøring:

Udover tilfældig batteri udskiftning, er din nye Wet-Stop3 designet til minimal vedligeholdelse. Efter hver brug tør alarmen og sensoren med en tør klud. Alarm enheden er ikke vandfast. Sørg for at alarm enheden ikke bliver renses eller nedsænket i vand eller andre væsker. Yderligere sensorer er tilgængelig fra PottyMD.

Batteri Udskift og Afhændelse:

Batteriet bør skiftes ud når som helst alarmen ikke fungerer, lyden eller vibrationerne er svage, eller hvis den hvide knap ikke viser lys når den bliver trykket/rykket. Fjern batteri låget på bagsiden af alarm enheden. Fjern de gamle batterier. Indsæt to nye AAA batterier ved at skubbe dem ind i batteri huset. Afhændelse af batterierne skal ske i henhold til de lokale miljømæssige regulationer. For yderligere detaljer vedrørende locale regulationer, kontakt dit lokale afhændelses eller miljømæssig repræsentant. Har du ønsker om at afhænde din Wet-Stop3 efter brug, fjern batterierne og afhænd Wet-Stop3 apparaturet ved lignende under andre ikke-farlige elektroniske affalds produkter.

Advarsels Erklæringer:

- 1- Wet-Stop3 er ikke ment som barne træning ophjælpning af potte træning eller for inkontinens relaterede problemer. Wet-Stop3 bør ikke blive anvendt på børn under fire år, medmindre dette er anbefalet af en læge.
- 2- Da apparaturet er installeret og ved brug, skal du forsikre dig at ledningen ikke på noget som helst tidspunkt bliver filteret omkring brugeren.
- 3- For at forhindre et chokerende tilfælde, skal du forsikre dig at apparaturet eller dets komponenter ikke på noget som helst tidspunkt er puttet i munden.
- 4- Hvis bruger vælger at bruge en sikkerhedsnål til at fastsætter alarm enheden med, vælg en sikkerhedsnål som ikke løsnes let. Fabrikanten påtager sig ikke ansvar for skader forvoldt ved brug af sikkerhedsnål. Wet-Stop3 er designet til kun at blive brugt ved brug af den magnetiske tether spænde/rem.
- 5- Dit barn kan muligvis blive disorienteret ved alarmens lyd. Et blødt tæppe eller polstring ved sengesiden kan hjælpe imod skader i tilfælde af dit barn ruller ud af sengen ved opvågning. Minimering af højden fra seng til gulv er anbefalet.
- 6- Wet-Stop3 er ikke ment for flere brugere.
- 7- Opbevar Wet-Stop3 på et koldt og tørt sted, imellem anvendelse.

Garanti:





Wet-Stop3 har et års garanti imod fabrikkations defekter i materialer og håndværksmæssigheder og imod brud og fejl ved normal brug. Denne garanti dækker ikke imod misbrug eller misligheder. PottyMD vil, i tilfælde af, reparere eller erstatte dette product uden omkostninger. Denne garanti giver dig specific retslydige rettigheder og du har muligvis også andre lovæssige rettigheder. For alarmer der ikke er købt direkte fra PottyMD kræves der bevis af køb, ved f.eks. en annulleret check eller en dateret butik's kvittering dette skal sendes sammen Wet-Stop3 for at være berettiget til at få en erstatning. Forsendelses og behandlings omkostninger som kunden har pådraget sig er ikke tilbagebetalende. PottyMD reserverer retten til at ændre specifikationer og garanti uden prior meddelelse..

Yderligere ressourcer:

Yderlig teknisk information vedrørende Wet-Stop3 er tilgængelig fra PottyMD. Du kan ringe eller sende en email til et medlem af PottyMD's ansatte hvis du har spørgsmål vedrørende vores enuresis alarm. Yderlig indeholder PottyMD webside (www.wet-stop.com and www.pottymd.com) mange nyttige informationer vedrørende sengevædnings temaet og sørger for andre reference informationer vedrørende PottyMD Wet-Stop apparatet.



Knoxville, TN USA
Toll-free (in USA & Canada): 877-768-8963
Tel: 865-584-6700 • fax: 865-584-6703
e-mail: support@pottymd.com • web: www.pottymd.com

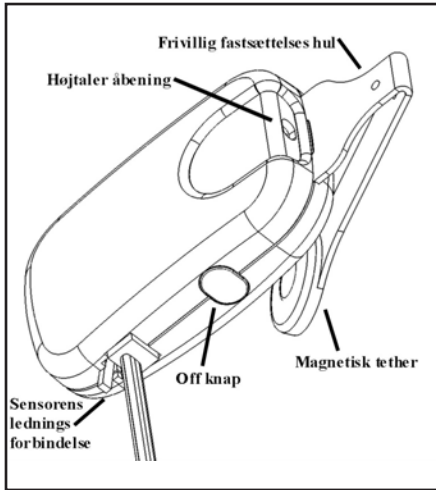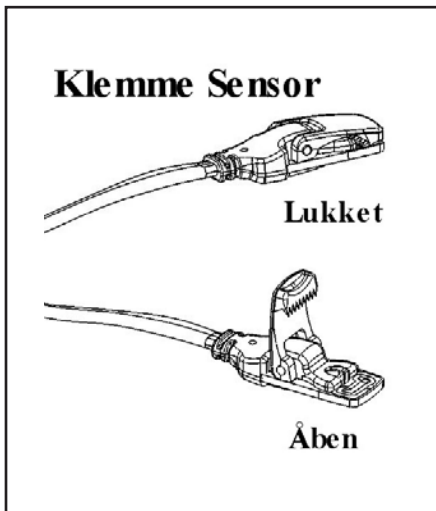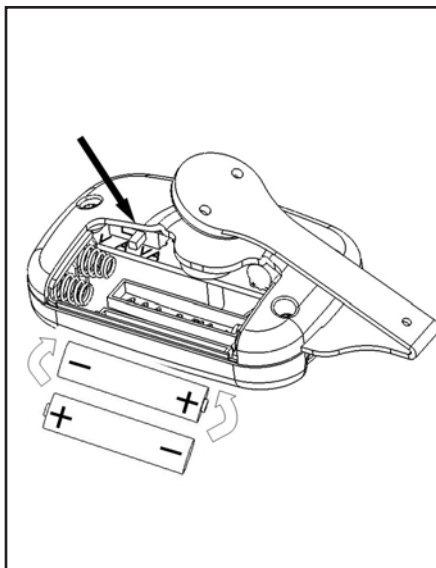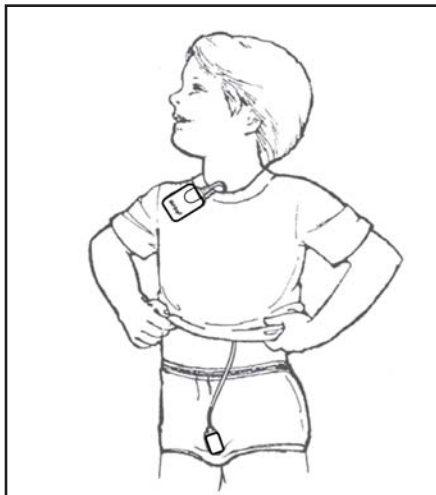

1- Ros dit barn når som helst du observerer fremskridt; for eksempel, vågne op til alarmen eller mindre uheld. Overflod af ros når som helst han eller hun imødeser alarmen og vågner op før lyden. Du og dit barn bør registrere tørre og våde nætter i en kalender. Brug belønnings kurven med mærker som er inkluderet med Wet-Stop3 alarmen. Sølv stjerne er tjent når dit barn reagerer ved alarmen og der er en lille våd plet, og guld stjernen er tjent når dit barn er tør hele natten.

2- Det er anbefalet at aften intag af mad og drikke bør ungås. Børn med nattemper sengevædning bør undgå kaffe og chokolade indtag gennem hele dagen

3- Husk – god dagtime blære og tarm vaner leder til natteleg tørhed!!

4- Udover tilfældig batteri udskiftning, er din nye Wet-Stop3 designet til minimal vedligeholdelse. Efter hver brug tør alarmen og sensoren med en tør klud. Alarm enheden er ikke vandfast. Sørg for at alarm enheden ikke bliver renses eller nedsænket i vand eller andre væsker. Yderligere sensorer er tilgængelig fra PottyMD.

5- Batteriet bør skiftes ud når som helst alarmen ikke fungerer, lyden eller vibrationerne er svage, eller hvis den hvide knap ikke viser lys når den bliver trykket/rykket. Fjern batteri låget på bagsiden af alarm enheden. Fjern de gamle batterier. Indsæt to nye AAA batterier ved at skubbe dem ind i batteri huset. Afhændelse af batterierne skal ske i henhold til de lokale miljømæssige regulationer. For yderligere detaljer vedrørende locale regulationer, kontakt dit lokale afhændelses eller miljømæssig repræsentant. Har du ønsker om at afhænde din Wet-Stop3 efter brug, fjern batterierne og afhænd Wet-Stop3 apparaturet ved lignende under andre ikke-farlige elektroniske affalds produkter.

6- Wet-Stop3 er ikke ment som barne træning ophjælpning af potte træning eller for inkontinens relaterede problemer. Wet-Stop3 bør ikke blive anvendt på børn under fire år, medmindre dette er anbefalet af en læge.

7- Da apparaturet er installeret og ved brug, skal du forsikre dig at ledningen ikke på noget som helst tidspunkt bliver filteret omkring brugeren.

8- For at forhindre et chokerende tilfælde, skal du forsikre dig at apparaturet eller dets komponenter ikke på noget som helst tidspunkt er puttet i munden.

9- Hvis bruger vælger at bruge en sikkerhedsnål til at fastsætter alarm enheden med, vælg en sikkerhedsnål som ikke løsnes let. Fabrikanten påtager sig ikke ansvar for skader forvoldt ved brug af sikkerhedsnål. Wet-Stop3 er designet til kun at blive brugt ved brug af den magnetiske tether spænde/rem.

10- Dit barn kan muligvis blive disorienteret ved alarmens lyd. Et blødt tæppe eller polstring ved sengesiden kan hjælpe imod skader i tilfælde af dit barn ruller ud af sengen ved opvågning. Minimering af højden fra seng til gulv er anbefalet.

11- Wet-Stop3 er ikke ment for flere brugere.

12- Opbevar Wet-Stop3 på et koldt og tørt sted, imellem anvendelse.

13- Wet-Stop3 har et års garanti imod fabrikkations defekter i materialer og håndværksmæssigheder og imod brud og fejl ved normal brug. Denne garanti dækker ikke imod misbrug eller misligheder. PottyMD vil, i tilfælde af, reparere eller erstatte dette product uden omkostninger. Denne garanti giver dig specific retslydige rettigheder og du har muligvis også andre lovæssige rettigheder. For alarmer der ikke er købt direkte fra PottyMD kræves der bevis af køb, ved f.eks. en annulleret check eller en dateret butik's kvittering dette skal sendes sammen Wet-Stop3 for at være berettiget til at få en erstatning. Forsendelses og behandlings omkostninger som kunden har pådraget sig er ikke tilbagebetalende. PottyMD reserverer retten til at ændre specifikationer og garanti uden prior meddelelse..

14- Yderlig teknisk information vedrørende Wet-Stop3 er tilgængelig fra PottyMD. Du kan ringe eller sende en email til et medlem af PottyMD's ansatte hvis du har spørgsmål vedrørende vores enuresis alarm. Yderlig indeholder PottyMD webside (www.wet-stop.com and www.pottymd.com) mange nyttige informationer vedrørende sengevædnings temaet og sørger for andre reference informationer vedrørende PottyMD Wet-Stop apparatet.

15- Knoxville, TN USA
Toll-free (in USA & Canada): 877-768-8963
Tel: 865-584-6700 • fax: 865-584-6703
e-mail: support@pottymd.com • web: www.pottymd.com

16- PN/REF: W103
Designed in USA – Made in China – All rights reserved
Patent Pending
Wet-Stop is a registered trademark of PottyMD LLC
©2007 PottyMD LLC

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany



CE marking of conformity



Type B Udstyr

Se instruktioner for brug

Batteri

Doc. #W103Danish